

# ISTRUZIONI DI UTILIZZO

## USAGE

Put The Mask On Mouth And Nose To Prevent Dust And Germs From Inhaling.



### Come si usa:

1. aprire la confezione e estrarre la maschera
2. mettere la maschera sul viso, in modo da coprire naso e bocca, la maschera si adatta perfettamente dal naso al mento
3. mettere gli elastici dietro le orecchie
4. regolare la clip del naso in modo che sia confortevole e sicura
5. mettere le mani davanti alla maschera e provare a respirare, assicurarsi che l'aria non fuoriesca dai bordi della maschera