



FACCIALE FILTRANTE FFP2 NR



Facciale filtrante monouso cod. CDN3S-P2 certificato EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR.
Protezione da polveri e aerosol.
Elastici per un agevole adattamento della mascherina da parte dell'utilizzatore.
Ponte nasale deformabile.

NOTA INFORMATIVA

ISTRUZIONI PER L'USO

Per proteggere la salute e prevenire gravi lesioni, è importante seguire le istruzioni sulla confezione.

- a. Tenere con la mano la mascherina con il ponte nasale rivolto verso l'alto. Lasciare che il dispositivo di protezione penda liberamente.
- b. Posizionare la mascherina sotto il mento, coprendo la bocca e il naso.
- c. Tirare l'elastico inferiore sulla testa fino sotto le orecchie. Tirare l'elastico superiore dietro alla testa sopra le orecchie per indossarle perfettamente.
- d. Premere il ponte nasale fino ad adattarlo perfettamente sul naso.
- e. Per verificare il corretto utilizzo, portare a coppa entrambe le mani sulla mascherina ed espirare con forza. Se l'aria fuoriesce attorno al naso, stringere il ponte nasale; se l'aria fuoriesce dai bordi, riposizionare la mascherina con una migliore adattabilità al viso. Ricontrollare e ripetere i passaggi citati fino a quando la mascherina è propriamente indossata.

L'utilizzo errato del dispositivo di protezione può nuocere gravemente alla salute.

Limitazioni:

- a. Non utilizzare in ambienti con meno di 19,5% di ossigeno;
- b. Non utilizzare in ambienti nocivi alla vita;
- c. Non eccedere il massimo utilizzo stabilito dagli standard dei regolamenti;
- d. L'errato utilizzo e conservazione del prodotto può nuocere alla salute;
- e. Non sostituire, modificare, aggiungere o omettere parti del prodotto configurato dal produttore.

Verificare prima dell'utilizzo:

- a. i lacci sono attaccati bene;
- b. il ponte nasale e la spugnetta sono attaccati propriamente alla mascherina;
- c. la posizione della valvola è locata adeguatamente (modello con valvola);
- d. la validità è riportata sulla confezione;
- e. non utilizzare la mascherina in caso sia danneggiata, con buchi, sporca o contaminata.

Avvertenze:

1. L'errato utilizzo del prodotto può ridurre l'efficacia dell'azione di protezione.
2. L'adeguata selezione della mascherina è essenziale per proteggere la salute. Prima di utilizzare la mascherina, consultare un igienista industriale o il personale della sicurezza sul lavoro per determinare l'idoneità all'uso previsto.
3. La mascherina non fornisce ossigeno e non dev'essere utilizzata in ambienti con meno di 19,5% di ossigeno.
4. Non utilizzare quando le concentrazioni di contaminazioni siano pericolose per la salute.
5. Lasciare immediatamente le aree del lavoro e respirare aria fresca in caso di difficoltà respiratoria, o vertigini o altri sintomi di dolore.
6. Per evitare fuoriuscite, evitare barbe o altri peli facciali che possano inibire il contatto tra il viso e i bordi della mascherina.
7. Non alterare, modificare o abusare della mascherina.
8. Utilizzabile solo per un turno singolo. Buttare la mascherina dopo il singolo utilizzo.
9. Sostituire immediatamente la mascherina quando risulta difficile respirare o la mascherina è danneggiata, o la mascherina non aderisce bene al viso.
10. Tenere la mascherina ancora da utilizzare in una confezione pulita e all'asciutto.
11. Non utilizzare in ambienti esplosivi.
12. Il materiale degli elastici può causare allergie ad alcuni individui. Rimuovere la mascherina in caso di irritazioni cutanee.
13. La validità del prodotto è due anni dalla data di produzione, se conservati nella confezione originaria e a temperatura tra -2 °C e +55 °C, e a meno di 75% di umidità.