



Dispositivi di protezione  
individuale

# Mascherina FFP2/KN95 MODELLO GREENCARE



## Mascherina filtrante 5 strati con supporto nasale omaggio

Autorizzazione INAIL  
del 25/03/2020

 **My Benefit**<sup>®</sup>  
il benessere della salute

# Mascherina FFP2/KN95

## MODELLO GREENCARE

### CARATTERISTICHE

La mascherina FFP2/KN95 Greencare è un dispositivo di protezione individuale capace di filtrare il 95% delle microparticelle sospese nell'aria. Protegge da batteri, virus, allergeni, nebbia, polveri, fumo, gas di scarico di auto ed altri agenti contaminanti. Plasmabile in 3 dimensioni, assicura un'ottimo livello di aderenza e comfort grazie anche al supporto nasale incluso.

### DETTAGLI TECNICI



#### Materiale (5 strati):

- 1. Superficie esterna:** Polipropilene tessuto-non-tessuto 40 g/m<sup>2</sup>
- 2. Imbottitura morbida:** tessuto-non-tessuto 45 g/m<sup>2</sup>
- 3. Filtro:** Polipropilene melt-blown 25 g/m<sup>2</sup>
- 4. Filtro:** Polipropilene melt-blown 25 g/m<sup>2</sup>
- 5. Superficie interna:** Polipropilene tessuto-non-tessuto 30 g/m<sup>2</sup>

**Dimensioni:** Pieghevole 15.5 x 10.5 (± 0.5 cm)

**Standard Filtrazione:** FFP2 – GB 2626 – 2006 KN95

**Condizioni di conservazione:** mantenere in condizione buie, secche e ben ventilate, lontano da fiamme libere e fonti di inquinamento.

**Shelf life:** 3 anni dalla data di produzione



### FUNZIONI

Le Mascherine FFP2 vengono utilizzate frequentemente per prevenire contagi batterici / virali e per prevenire la respirazione di particelle dannose:


- *In ambito edile;*
- *Nell'industria chimica;*
- *Nell'industria sanitaria;*
- *Come dispositivo di protezione da allergeni.*

La mascherina è inoltre un'efficace protezione per qualsiasi condizione ambientale ed atmosferica. Può proteggere da nebbia, polveri, fumo, gas di scarico di auto ed altri inquinanti.

# Mascherina FFP2/KN95

## MODELLO GREENCARE

### ISTRUZIONI PER L'USO

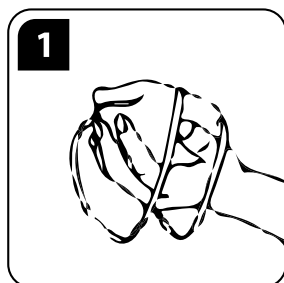

1. Aprire la mascherina, apporre il supporto nasale in corrispondenza del ponte nasale
2. Appoggiare la mascherina sul mento e tirare l'elastico alle orecchie, regolare fino ad un'indossatura confortevole
3. Aggiustare il clip nasale alla forma del naso
4. Premere entrambi gli indici sul clip nasale per creare aderenza e impedire fuoriuscite d'aria

### INDICAZIONI

- Seguire attentamente le figure illustrative e le istruzioni per l'uso per il corretto utilizzo della mascherina e controllare il livello di aderenza al viso.
- La mascherina non è efficace per prevenire l'inalazione di gas, vapori e fumiganti tossici o se indossata in un'area con una concentrazione di ossigeno inferiore al 19,5%.
- Indossare solo in aree adeguatamente ventilate e ossigenate.
- Non va indossata e non costituisce una protezione adeguata in casi di concentrazione letale di agenti tossici o contaminanti.
- Abbandonare immediatamente l'attività in corso e cercare assistenza sanitaria se:
  - Si incontrano difficoltà respiratorie;
  - Si avverte un principio di vertigini, nausea o altro malessere fisico;
- Mascherina monouso, non riutilizzare.
- Alterare, modificare, o riparare la mascherina in modo improprio ne renderà nulla l'azione filtrante.
- Quando la si getta, ripiegarla rivolgendo l'esterno verso il centro.

### IMPORTANTE

La mascherina è in grado di filtrare alcuni agenti contaminanti, ma un utilizzo scorretto può causare contagio e conseguente malattia, fino alla morte. Materiali in diretto contatto con la pelle possono causare una reazione allergica in certi individui ipersensibili.




## MASCHERINE FFP2/KN95 MODELLO GREENCARE

SUPPORTO NASALE  
OMAGGIO

+ ADERENZA  
+ COMFORT



- 1 Superficie esterna:** Polipropilene tessuto-non-tessuto **40 g/m<sup>2</sup>**
- 2 Imbottitura morbida:** tessuto-non-tessuto **45 g/m<sup>2</sup>**
- 3 Filtro:** Polipropilene melt-blown **25 g/m<sup>2</sup>**
- 4 Filtro:** Polipropilene melt-blown **25 g/m<sup>2</sup>**
- 5 Superficie interna:** Polipropilene tessuto-non-tessuto **30 g/m<sup>2</sup>**

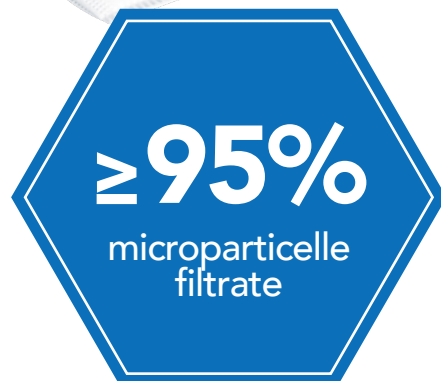

Autorizzazione INAIL  
del 25/03/2020

 **My Benefit**<sup>®</sup>  
il benessere della salute