

**SURGIKA**

SURGIKA S.r.L.

Via 2 Giugno 125, 52021 Levane-Bucine (AR) - ITALIA



EN 149

**SURGIKA**

SURGIKA S.r.L.

Via 2 Giugno 125, 52021 Levane-Bucine (AR) - ITALIA



EN 149

## “ISTRUZIONI PER L’USO”

“Leggere e seguire le istruzioni per l’uso fornite dal fabbricante”

### MASCHERA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE – Mod. KN95 – Tipo ZYKN95

Classificazione: FFP2 NR secondo EN 149

#### COME INDOSSARE IL DISPOSITIVO:

Prima dell’uso, verificare lo stato del dispositivo, NON utilizzare la mascherina nel caso in cui presenti danni (strappi, tagli, mancanza dei dispositivi di fissaggio, ecc.) o che presenti sporcizia in corrispondenza del lato per la respirazione.



1. Prendere la mascherina per i due elastici con il facciale rivolto verso l’alto, come mostrato in figura.
2. Posizionare il facciale sul viso, in modo da coprire il naso, la bocca ed il mento, come mostrato in figura.
3. Collocare gli elastici di fissaggio dietro alle orecchie, come mostrato in figura.
4. Piegare e stringere bene il clip nasale in modo da far aderire bene il facciale al viso ed evitare fughe.
5. Controllare che il dispositivo sia indossato bene e faccia tenuta come segue (per dispositivi senza valvola): coprire la mascherina con entrambe le mani ed espirare vigorosamente. Se sentite che l’aria passa attraverso i bordi ed intorno alle narici, sistemare nuovamente il dispositivo sul viso e stringere nuovamente il clip nasale. Ripetere l’operazione sino ad ottenere un risultato ottimale.

**Se non riesce ad indossare correttamente la mascherina, evitare la zona contaminata.**

#### IMPORTANTE:

Le semimaschere filtranti monouso sono classificate secondo tre categorie: FFP1, FFP2 o FFP3. Controllate sempre a quale categoria appartiene la vostra mascherina. Le indicazioni e le marcature si trovano sia sul dispositivo che sul relativo imballo. Le lettere **NR** indicano che le mascherine sono monouso e devono essere gettati alla fine del turno di lavoro.

**FFP2:** protezione contro polvere, fumi o nebbie non tossici, di bassa/media tossicità in concentrazione fino a 12 x TLV o 10 x APF. (NOTA: TLV: Valore Limite di Soglia – APF: Fattore di Protezione Assegnato).

#### PRECAUZIONI D’UTILIZZO:

1. Se non si eseguono scrupolosamente le istruzioni per l’uso e le limitazioni relative all’utilizzo della mascherina e/o non si usa la stessa durante l’intero periodo di esposizione, l’efficacia della mascherina risulterà inferiore e potrà portare a contaminazione o morte.
2. Prima dell’uso, l’utilizzatore deve informarsi sull’uso corretto della mascherina in conformità con le indicazioni di sicurezza e di salute applicabili.
3. La mascherina non è un dispositivo medico e non è idonea per essere utilizzata in quegli ambiti sanitari in cui chi la indossa non deve contaminare l’ambiente o le persone presenti (per es. pazienti). Non è idonea per ambienti sterili e asettici.
4. Viceversa, la mascherina può essere utilizzata anche in ambiente ospedaliero ed assistenziale (per es. ambulatori, case di cura, ecc.) per proteggere l’utilizzatore dagli agenti esterni (compresa la trasmissione di infezioni da aerosol).
5. **Questo dispositivo non fornisce ossigeno.** La mascherina non deve essere utilizzata in ambienti in cui la percentuale di ossigeno nell’atmosfera è inferiore al 17%. Utilizzare la mascherina esclusivamente in aree ben ventilate che contengano abbastanza ossigeno.
6. Non utilizzare quando le concentrazioni di contaminanti sono pericolose per la salute o la vita.

7. Non utilizzare quando le concentrazioni di contaminanti sono sconosciute. La mascherina va usata solo quando si conoscono le concentrazioni di sostanze nocive. In caso di sostanze sconosciute o condizioni variabili, si deve usare un dispositivo di respirazione.
8. Non utilizzare in presenza di atmosfere esplosive o potenzialmente esplosive.
9. Se la mascherina risulta danneggiata o se si fatica a respirare, abbandonare immediatamente la zona contaminata, rimuoverla e sostituire la mascherina. Abbandonare la zona contaminata se si avvertono vertigini, ansia o altri fastidi.
10. Non alterare né modificare la mascherina.
11. Non utilizzare la mascherina con barba o altri peli facciali che impediscono il contatto diretto del viso con il bordo del dispositivo. Peli di barba e certe caratteristiche respiratorie possono ridurre l’efficienza di questa mascherina filtrante.
12. Solo monouso. Non riutilizzabile (idonea per un solo turno di lavoro continuativo). Non necessita di manutenzione. Scartare e smaltire la mascherina dopo il singolo utilizzo.
13. Conservare i dispositivi di protezione ancora imballati nelle loro bustine trasparenti, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare o altre fonti di calore.

#### VITA UTILE:

L’eccessiva resistenza alla respirazione indica l’ostruzione della mascherina alle particelle di polvere, la mascherina è un dispositivo di protezione individuale, la durata massima di utilizzo è per un turno di lavoro o 8 ore al giorno.

#### ISTRUZIONI PER L’IMMAGAZZINAMENTO E LA CONSERVAZIONE:

Fino al momento dell’utilizzo, la mascherina va conservata nel suo imballaggio originale, sigillato per conservarne le sue proprietà. Durante la conservazione, il trasporto e l’immagazzinamento, devono essere rispettate le condizioni ambientali previste dal fabbricante per la corretta conservazione del dispositivo

#### SCADENZA:

Il dispositivo garantisce le sue prestazioni per una durata di 36 mesi (3 anni) dalla data di fabbricazione.


#### FIGURE:



Vista lato esterno.



Marcatura imballaggio.

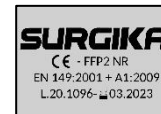

Marcatura semimaschera.