



1





2



3



4

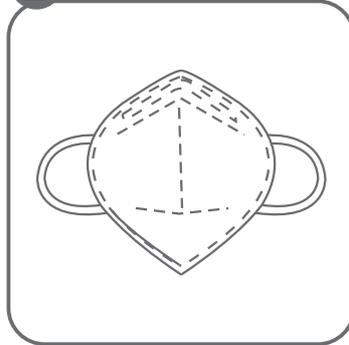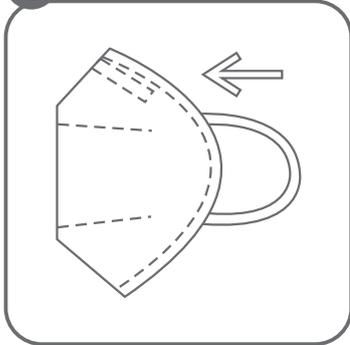

- 1 - Tenere la parte sporgente esterna al viso e appendere gli elastici sopra le orecchie
- 2 - Riponila sul viso e allunga la maschera fino a coprire completamente naso, bocca e mento
- 3 - Regola la clip per il naso e premila in modo che la maschera aderisca bene al viso
- 4 - Se danneggiata, che emana cattivo odore o umida, sostituirla immediatamente con una nuova

INFORMAZIONI IMPORTANTI SUL PRODOTTO

- 1) Questo prodotto è monouso e non può essere ripulito/lavato per il riutilizzo.
- 2) Il prodotto va indossato correttamente fissando entrambi gli elastici ed assicurandosi aderisca al viso il più possibile.
- 3) Non è consigliato l'utilizzo della mascherina in presenza di areazione contaminata, se si riportano problemi respiratori o durante il sonno.
- 4) Dopo l'uso non gettare il prodotto nella spazzatura tradizionale onde evitare una possibile contaminazione o inquinamento batterico. Si raccomanda di piegarlo e smaltirlo negli speciali cestini medici per uno smaltimento adeguato.

N.B. Questo prodotto va a diretto contatto con la bocca. Dopo che esso viene tolto dall'imballo originale non può essere restituito per problemi di qualità.